

Инструкция по эксплуатации Аппарат для надевания бахил



QY – 100

Уважаемый клиент

Спасибо за покупку продукции нашей компании. Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию и сохраняйте её на всё время эксплуатации. Благодаря аппарату для надевания бахил, вам не придется беспокоиться о чистоте помещений, которые загрязняются приносимой на подошвах обуви грязью. Данная инструкция ознакомит вас со всеми процессами работы аппарата. При возникновении каких-либо вопросов, не озвученных в данной инструкции, обратитесь к поставщику.

Описание

В аппарат устанавливается блок с бахилами. Бахилы в аппарате находятся в натянутом состоянии. Установить ногу в центр аппарата, нажимая на педаль, в результате чего, на обувь одевается бахила.

Подготовка к работе

1. Развернуть упаковку с бахилами и разместить ее по форме аппарата. Т-образные клипсы, находящиеся на бахилах, установите в Т-образные отверстия на зажимах, в углах аппарата.



2. Аккуратно распрямите резиновые нити на упаковке бахил и поместите Т-образные клипсы в Т-образные отверстия, находящиеся по углам аппарата. Данное действие повторить со всеми четырьмя клипсами.



3. На всех четырех клипсах развязать нити.



4. При загрузке следующей упаковки бахил, необходимо надавить на Т-образные клипсы, установленные ранее, так чтобы они переместились вниз. После этого повторить действия, указанные в пунктах 1 – 3.



5. Выровнять бахилы, загруженные в аппарат.



6. Перед началом эксплуатации проверьте правильность установки бахил. Клипса Т-образной формы на 1 мм должна выступать из Т-образного отверстия. Если выступ отсутствует, аккуратно потяните за клипсу.



Эксплуатация аппарата

Аппарат для надевая бахил – это современное решение поддержания чистоты в помещении.

Аппарат имеет множество преимуществ:

- аппарат легко перемещать с места на место;

- процесс одевания бахил занимает пару секунд;
- аппарат легкий и компактный, занимает минимальную площадь;
- аппарат легок в заправке и эксплуатации.

1. Установите ногу в аппарат.



2. Слегка надавите вниз по центру аппарата.



3. Уберите ногу, одетую в бахилу, из аппарата.



Сервисное обслуживание

1. При обращении за гарантийным ремонтом потребителю необходимо предъявить: -неисправное изделие; -гарантийный талон; -документы на приобретение товара (накладная, квитанция об оплате и т.д.), с указанием фирмы продавца, даты покупки, для установления гарантийного срока, а так же модели и серийного номера изделия. В противном случае товар не подлежит гарантийному ремонту. При отсутствии печати продавца, даты продажи или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

2. Продавец несет гарантийные обязательства в течение _____ месяцев со дня продажи (при отсутствии нарушений настоящих Условий).

3. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия: шланги, шнуры, трубки, щетки, насадки, пылесборники, лезвия стяжки, кожухи, колёса, ролики, бампера, фары (включая стробоскопическую), цепи и ремни, фильтры, экраны, щётки мотора и щёточно-коллекторный узел, щётки, пады, замки падов, ведущие колёса, пневматические шины, уплотнители и прокладки, вакуумные моторы со следами жидкости или грязи или отработавшие более 400 часов, аккумуляторы и т.д.

4. Продавец не несет гарантийных обязательств, в следующих случаях: -если изделие использовалось не по его прямому назначению; -в случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации; -если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; -если дефект вызван изменениями конструкции изделия, не предусмотренными "Изготовителем"; -если дефект вызван действиями неодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц; -при механических повреждениях (при транспортировке, хранении и т.д.), нарушении пломбировки, самостоятельной регулировке или ремонте узлов и агрегатов; -при повреждениях, вызванных использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей и т.д.

5. Продавец оставляет за собой право провести экспертизу и отказаться от гарантийных обязательств, случаях перечисленных в п.4;

6. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

**В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией, просим Вас
обращаться к нам по телефонам:
718-79-01, 718-79-03, 718-22-80, 718-27-20, 332-10-45, 718-28-79**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование _____

Модель _____

Серийный номер _____

Признан годным к эксплуатации.

Дата продажи _____

Печать продавца

Предпродажная подготовка и проверка произведена в присутствии покупателя. Внешний вид – без повреждений, комплектность полная. С условиями гарантийного обслуживания согласен, с условиями эксплуатации ознакомлен.

Покупатель / представитель фирмы _____ (дата) _____ (подпись) _____ (ФИО)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Описание дефекта

Выполненные работы

ФИО мастера _____ Подпись _____ Дата _____